


# Système de compression dynamique pour thorax en carène



**Ce dispositif est destiné au traitement non invasif du pectus Carinatum ou thorax en carène.**

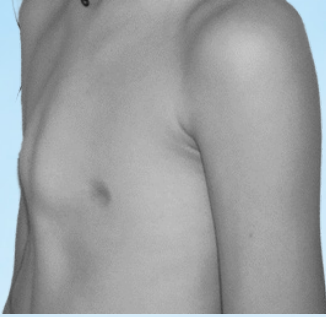

**Le système vise à réduire de façon pérenne l'excroissance qui est apparue en la comprimant par le biais d'un harnais.**

**Une première consultation permet de déterminer si le système est bien adapté à la situation du patient et des mesures sont prises pour pouvoir l'adapter.**

**Si le traitement par système de compression est indiqué, le harnais est réalisé sur mesure et des réglages seront réalisés lors de la consultation d'essayage.**

**La pression efficace est alors déterminée par prise de mesures et le réglage voulu est identifié.**



**Le harnais se porte sur la peau et reste discret sous les vêtements.**



**Exemple de résultat possible sur un patient de 14 ans après quelques mois de traitement**



- ✓ Pour assurer le succès du traitement, le harnais doit être porté le plus souvent possible (jusqu'à 23h/jour).  
Il doit être porté la nuit comme le jour de manière continue.  
Il doit seulement être retiré lors de la toilette et des activités sportives.
- ✓ Pour limiter le risque d'atteintes de la peau, un soin particulier doit être porté à l'hygiène.  
Le patient doit se laver tous les jours.  
Il est recommandé d'hydrater la peau avec de la crème.
- ✓ Même si dans un premier temps une amélioration rapide est constatée, le traitement doit être prolongé jusqu'à stabilisation effective.  
Dès que la déformation est résorbée, il faudra porter le système uniquement la nuit.
- ✓ Pour toute question ou doute ne pas hésiter à nous contacter.
- ✓ **Entretien**  
Le nettoyage du harnais peut se faire avec un tissu doux. Le tissu peut être humidifié soit avec de l'eau claire, savonnée, ou à l'alcool à 90°.
- ✓ Durant toute la durée du traitement nous garantissons l'ajustement et le remplacement des pièces de manière à augmenter ou diminuer la circonférence du harnais.

***Dispositif médical sur mesure livrable uniquement sur prescription médicale***

