

Protocole pour la fabrication d'une prothèse sur mesure de coude

CT du membre supérieur atteint, incluant :

- épaule jusqu'à l'extrémité de l'avant-bras ;
- idéalement **humérus complet + coude + ulna proximal + radius proximal** ;
- acquisition avec le membre dans une position reproductible et confortable ;
- coupes fines de 0,5 à **1 mm** ;
- reconstruction osseuse haute résolution ;
- données fournies au format **DICOM non compressé**.
- conserver les données DICOM originales ;
- éviter les artefacts métalliques si le patient possède déjà du matériel ;
- inclure suffisamment d'humérus sain en proximal pour permettre la conception et le dimensionnement de la tige.

Radiographies

- coude **face** et profil avec l'humérus entier ainsi que l'ulna et le radius entier **face** et profil